

EU-indicaties: AtriCure 's cryoICE cryoSPHERE-cryoablatiesondes zijn steriele instrumenten voor eenmalig gebruik die bedoeld zijn voor het blokkeren van pijn door middel van een tijdelijke ablatie van intercostale perifere zenuwen.

Lees de gebruiksaanwijzing voor een volledige lijst met contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen voordat u deze instrumenten gebruikt.

ATRICURE EUROPE B.V.

De Entree 260
1101 EE Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 (0) 20-7005560
Fax: +31 (0) 20-7005561
SalesSupportEU@AtriCure.com
Europe.AtriCure.com

PM-EU-3935A-1226-G

AtriCure



Patiëntenvoorlichting Cryo Nerve Block-therapie


Een niet-opioïde oplossing voor postoperatieve pijn

AtriCure

Wat is Cryo Nerve Block-therapie?

Cryo Nerve Block-therapie helpt postoperatieve pijn te verlichten door de zenuwen in de borst onder elke rib te bevriezen. Deze zenuwen vormen de belangrijkste doelwit bij pijnbestrijding na een borstoperatie.


Cryo Nerve Block werkt door tijdelijk pijnsignalen te blokkeren, wat lijkt op het uitschakelen van de zenuw. Na uw operatie zult u een gevoel van verdoofdheid hebben, **wat betekent dat u veel minder pijn hebt**. Het gevoel van verdoofdheid zal langzaam verdwijnen tijdens het genezingsproces en zal enkele maanden aanhouden.

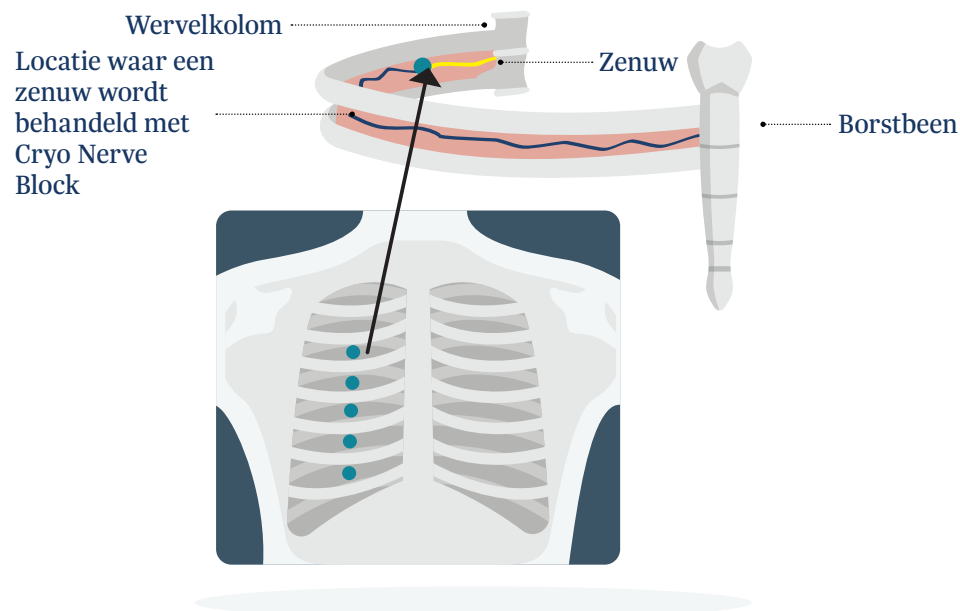

Cryo Nerve Block werkt door tijdelijk zenuwsignalen te blokkeren, wat betekent dat u minder pijn heeft na de operatie.

Hoe werkt Cryo Nerve Block?

Uw zenuw bestaat uit twee belangrijke onderdelen: een buitenste beschermende structuur en de zenuwvezels daarin die pijnsignalen waarnemen en naar de hersenen sturen. Cryo Nerve Block voorkomt dat deze signalen naar de hersenen worden gestuurd door de zenuw te bevriezen bij een specifieke temperatuur, waardoor deze tijdelijk uitgeschakeld zonder de buitenste beschermende structuur te beschadigen.

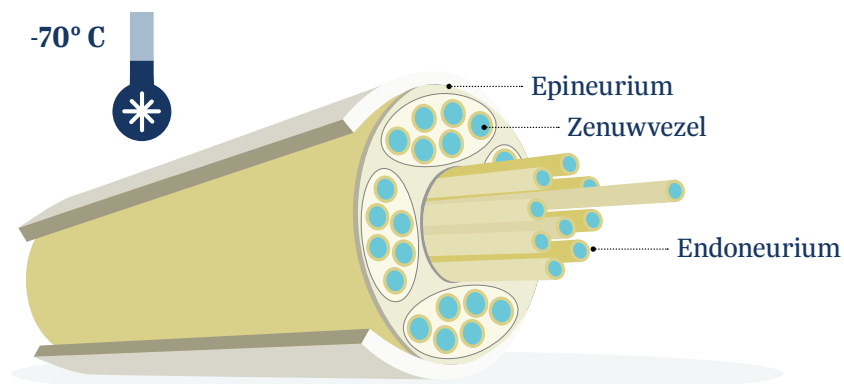

Gedurende uw herstel, zal de zenuw in de loop van enkele maanden weer aangroeien en zal het normale gevoel in uw borst geleidelijk terugkeren. Met deze therapie kunt u lichte activiteiten uitvoeren, hoesten en diep ademhalen zonder pijn.



Een langwerkende behandeling

Na het ontvangen van Cryo Nerve Block, zou u binnen een paar dagen verdoofd gevoel in uw borst moeten gaan ervaren. Het verdoofd gevoel kan enkele maanden aanhouden, aangezien de zenuw 1-2 mm per dag teruggroeit. Naarmate het verdoofd gevoel afneemt, zullen deze plaatsmaken voor tintelingen, jeuk of andere sensaties.



Met Cryo Nerve Block wisselt u pijn in voor verdoofd gevoel

Zal ik nog steeds wat pijn ervaren na een operatie?

Soorten pijn na een operatie

Het is normaal om een beetje pijn te ervaren na een operatie, maar voor velen helpt Cryo Nerve Block om zenuwpijn te verlichten. Er zijn drie pijn gradaties pijn die u kunt hebben:



- Pijn van de **incisie** die het gevolg is van het snijden in de huid door de chirurg en die ongeveer 7-10 dagen aanhoudt.
- **Spierpijn** van de operatie, die aanvoelt als stijfheid en tot zes weken kan aanhouden.
- **Zenuwpijn**, die aanvoelt als scherpe, stekende of brandende pijn, of als gevoelloosheid. Dit zorgt er ook voor dat uw huid pijn voelt, zelfs bij lichte aanraking (overgevoeligheid genoemd). In veel gevallen straalt zenuwpijn uit van de achterkant naar de voorkant van de borst.

Al deze soorten pijn zijn gerelateerd aan de incisie die de chirurg heeft gemaakt in de weefsels van het lichaam - huid, spieren en zenuwen - tijdens de operatie. Zenuwpijn na de operatie kan tot een jaar aanhouden; in zeldzame gevallen kan deze pijn niet worden verlicht.

Voor velen helpt Cryo Nerve Block om zenuwpijn, wat vaak voorkomt na een operatie, te verlichten

Met uw arts over pijn praten

Vertel uw artsenteam wanneer de gevoelloosheid verdwijnt en het normale gevoel terugkeert. Als er tijdens de operatie echter schade is ontstaan aan de beschermende structuur van de zenuw in de buurt van de incisieplaats, kunt u wanneer u weer gevoel in de borst krijgt, opnieuw zenuwpijn in dat gebied ervaren. Neem contact op met uw arts om te bespreken hoe de pijn het best kan worden aangepakt. Deze symptomen kunnen u helpen zenuwpijn te bespreken met uw arts.

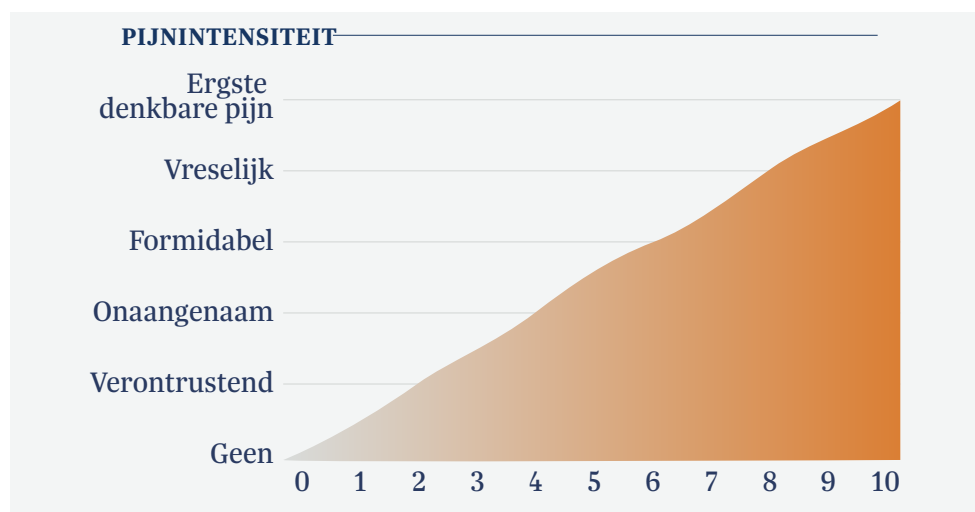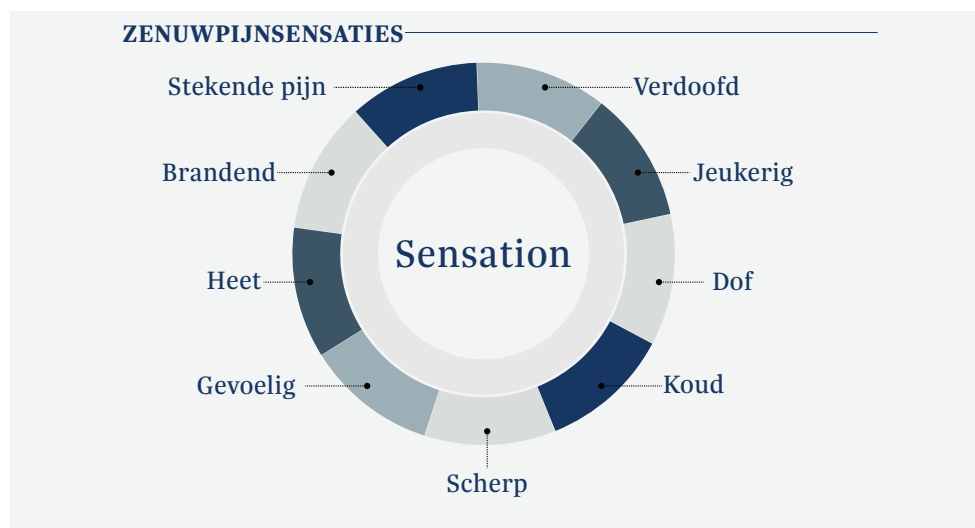

Meer informatie over Cryo Nerve Block-therapie

Bezoek de website om de ervaringen van patiënten te bekijken en meer informatie te krijgen over hoe Cryo Nerve Block wordt gebruikt bij chirurgische ingrepen.

